


AmpSnap® Ampullin rikkoja



AmpSnap® soveltuu 1-10 ml ampulleille.

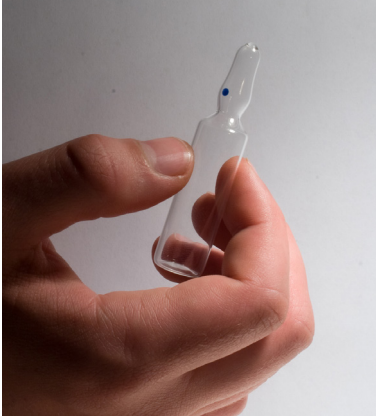

Molemmat päät voidaan käyttää.


Ohje:

AmpSnap® kaappaa turvallisesti ampullin terävän kärjen suojatakseen käyttäjää ja eliminoidakseen samalla ampullijätteen käsittelyyn liittyvät riskit.

Monet käyttäjät rikkovat ampullit yksinkertaisesti hyödyntämällä pyyhkeitä tai sideharson paloja, jotka altistavat heidät terävistä reunoista syntyville haavoille.




3Työnä toinen AmpSnap®-tuotteen pää kokonaan ampullin kaulan yli ja tartu katkoviivaan, jos se on näkyvillä.

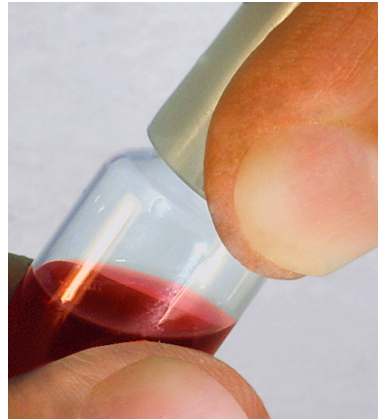

4Käyttäessäsi AmpSnap®-tuotetta ja kiinteää kaksiosaista kädensijaa, taivuta ampullin kärki itseäsi kohti, jotta se murtuu turvallisesti.

AmpSnap®-tuotetta tulee käyttää myös silloin, kun on tarve käyttää viilaa ampullin heikentämiseksi ennen murtamista.

Ruotsissa valmistettu AmpSnap® on valmistettu ympäristöystävällisestä polyeteenistä (PE).

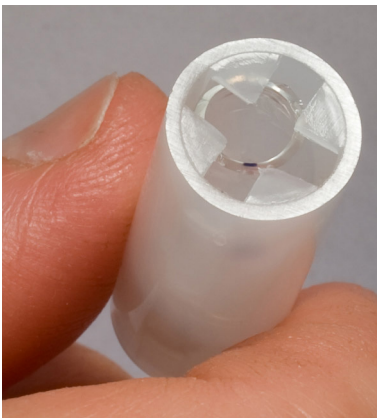

Irronnut ampullin kärki on kaappattu turvallisesti AmpSnap®-tuotteen sisälle, jolloin se suojaa loukkaantumiselta.



AmpSnap®, ehjiin rikkomisiin. Suojaa lasin teräviltä reunoilta.

**Käyttämällä AmpSnap®
-tuotetta, vähennät haa-
voittumisriskiä rikkoessasi
ampullein**

